



shouldfix

REF. 8408

Immobilizzatore per braccio e spalla senza tasca gomito



DESIGNED AND
DEVELOPED IN
SWITZERLAND



90CFG00330TA09.0825

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

Immobilizzatore per braccio e spalla senza tasca gomito

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI

Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna; NON utilizzare il prodotto in caso di intolleranze o allergie a una o più componenti presenti nello stesso. È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE

È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti.

SCELTA/DIMENSIONI

Codice	REF. 8408
Taglia	universale
Colore	nero

ambidestro



MANUTENZIONE

- Non candeggiare
 - Non stirare
 - Istruzioni per il lavaggio: lavare a mano ad una temperatura di max 30°C con detergente neutro. Far asciugare lontano da fonti di calore.
 - Pulizia chimica non consentita
 - Non asciugare in asciugatrice
- Non disperdere il prodotto o i suoi componenti nell'ambiente.

INDICAZIONI

- Fratture composte dell'omero
- Lussazioni gleno-omerali
- Distorsioni della spalla
- Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale
- Trattamento post-operatorio nelle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
- Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto accoppiato
- Tiranti girospalla con chiusura a fibbia autobloccante
- Senza tasca di contenimento del gomito
- Particolarmente indicato per soggetti di corporatura robusta

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 1 Alloggiare il braccio piegato ad angolo nella tasca in tela (A).
- 2 Far passare i tiranti sui fianchi.
- 3 Incrociare i tiranti sulla schiena (B) e farli passare sopra le spalle (C).
- 4 Riportare le estremità dei tiranti sul davanti, infilare i velcri uncino negli appositi passanti (D) posti all'estremità dei tiranti e fissarli alla presa a Velcro® asola cucita sulla tasca.
- 5 Stringere tramite le fibbie autobloccanti.
- 6 Fissare la fascia (E) sulla presa a velcro asola cucita sulla tasca.
- 7 Girare la fascia (E) attorno al tronco coprendo il braccio da immobilizzare e chiuderla su se stessa.



È un dispositivo medico, leggero e confortevole, che assicura un'ottima immobilizzazione dell'articolazione della spalla, mantenendo l'arto interessato in una posizione corretta ed efficace per tutto il periodo di convalescenza. Il fascione in accoppiato nero aumenta la capacità di bloccaggio articolare e dunque l'efficacia del trattamento.

Di facile applicazione, assume la sua posizione funzionale in pochissimi secondi. Non è dotato di tasca di contenimento per il gomito.

Il tessuto in cotone al 100%, traspirante, lavabile e resistente, rende più confortevole l'utilizzo.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE