



genuFIT



Linea Genufit:

Nuove
nella tecnica
e nell'estetica,
ancora più
confortevoli.



Tuffatevi nel nuovo

16 modelli rinnovati di ginocchiere, ortesi e tutori dalla linea moderna, disponibili in numerose taglie e varianti per un trattamento ottimale delle diverse patologie

STABILIZZAZIONE, SCARICO, SOLLIEVO DAL DOLORE

Collaudato sistema di ortesi per un efficace scarico e stabilizzazione del ginocchio con riduzione della dolorabilità.

In base all'indicazione terapeutica è possibile scegliere fra 16 diversi tipi di ginocchiere: dal semplice tubolare elastico a un'ortesi munita di snodo policentrico, con o senza limitazione della flessione-estensione.

Le ginocchiere **Genufit** sono indicate sia per la riabilitazione post-chirurgica sia come presidi per la terapia conservativa.

STRUTTURA


La struttura a diretto contatto con la pelle è realizzata in Air-X™, un tessuto tridimensionale ottenuto dalla tessitura in 3 dimensioni di un filo di Poliestere ed Elastan, in grado di creare una trama leggera permeabile all'acqua, e quindi traspirante, ma allo stesso tempo elastica e contenitiva.

Riducendo non solo le sensazioni di fastidio, ma anche eventuali irritazioni della cute, consente di indossare il tutore per periodi più lunghi.

TANTI NUOVI VANTAGGI PER I VOSTRI PAZIENTI

Grazie al nuovo design anatomico, alla struttura traspirante in tessuto AirX™ anallergico, a un inserto popliteo morbido e privo di cuciture e alla presenza di bordi morbidi ed elastici, le ginocchiere **Genufit** assicurano un comfort e una funzionalità ancora più elevati.

Un'ulteriore novità sui modelli aperti è l'apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura: chiusura centrale interna di prefissaggio ed esterna di fissaggio definitivo.

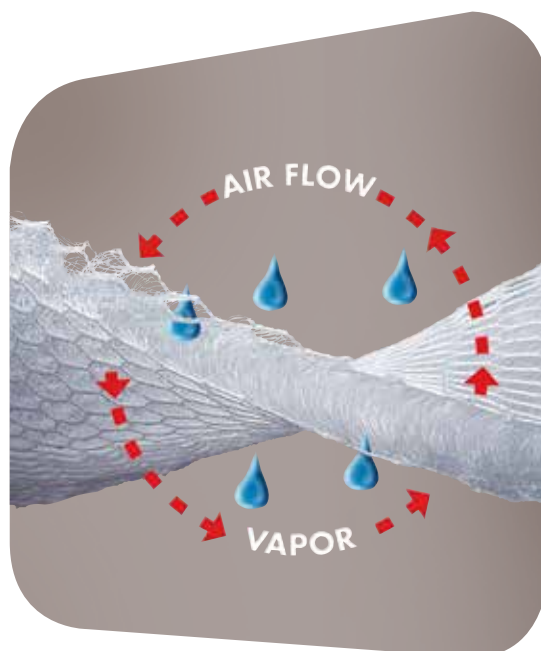

mondo di genuFIT

NUOVO DESIGN

Revisione dell'intera costruzione per un profilo ancora più sottile e conforme all'anatomia dell'arto.

NUOVO INSERTO

Inserto (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort del paziente.

NUOVO BORDO

Per un risultato ottimale, il bordo deve aderire senza stringere. Questo design di nuova concezione, frutto di un gioco ottimale fra materiale elastico e cuciture, risponde esattamente a questi requisiti.

NUOVA APERTURA

Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di prefissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula 08A / 15A / 25A / 27A / 29A / 30A



Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente una buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione

Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort

Struttura in tessuto AirX™ traspirante

Nuovo bordo più morbido ed elastico



Nuova apertura frontale (Modello A)

genuFIT 08 · 08A

Ginocchiera in tessuto AirX™ con stecche a spirale (tubolare) · (apribile)



genuFIT
08



genuFIT
08A

FUNZIONALITÀ

Ginocchiera con stecche a spirale per una lieve stabilizzazione latero-mediale. Il nuovo sistema di chiusura dotato di doppie cinghie di stabilizzazione permette una regolazione ottimale della trazione. Riduzione del dolore grazie all'azione propriocettiva. Genufit 08 (con apertura rotulea e stabilizzatore in materiale espanso) si presta anche alla stabilizzazione della rotula nei casi di lieve entità.

CARATTERISTICHE

- Sistema di chiusura rinnovato (European Patent): cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- Nuove tasche in polimero flessibile a basso profilo, copri-stecche e passa-cinghie
- Stecche a spirale laterali di rinforzo
- Solo Genufit 08: foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Solo Genufit 08A: nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula

INDICAZIONI

- Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)

Solo Genufit 08:

- Lieve instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea



genuFIT 15 · 15A

Ginocchiera in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche (tubolare) · (apribile)

FUNZIONALITÀ

Le aste articolate policentriche e il nuovo sistema di chiusura a cinturini sdoppiati della linea Genufit 15 consentono una buona stabilizzazione latero-mediale. Riduzione del dolore grazie all'azione propriocettiva.

Genufit 15 (con apertura rotulea e stabilizzatore in materiale espanso) si presta anche alla stabilizzazione della rotula nei casi di lieve instabilità.

CARATTERISTICHE

- Sistema di chiusura rinnovato (European Patent): cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- Aste articolate policentriche a bassissimo profilo
- Solo Genufit 15: foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Solo Genufit 15A: nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula

INDICAZIONI

- Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)

Solo Genufit 15:

- Lieve instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea



genuFIT 25 · 27

Ginocchiera tubolare (corta) · (lunga) in tessuto AirX™
con aste articolate policentriche a controllo F-E

genuFIT 25A · 27A

Ginocchiera apribile (corta) · (lunga) in tessuto AirX™
con aste articolate policentriche a controllo F-E



CARATTERISTICHE

- Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei:
Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.
Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°.
Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°
- Solo Genufit 25A/27A: nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Tiranti di chiusura a Velcro®
- Solo Genufit 25/27: foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Disponibile in due lunghezze:
34 cm (solo Genufit 25/25A)
e 41 cm (solo Genufit 27/27A)
- Solo Genufit 27/27A: inserto elastico posteriore, nella parte prossimale di coscia



Snodo a basso profilo facilmente apribile dall'esterno tramite due viti.



Flessione, estensione e blocco regolabili attraverso gli appositi cunei di fissaggio.



Nel kit in dotazione sono inclusi una serie di cunei corrispondenti ai diversi gradi di regolazione.



genuFIT
27



genuFIT
27A

INDICAZIONI

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

FUNZIONALITÀ

Nell'ambito del trattamento conservativo per traumi distorsivi fino al II° grado (non coinvolgenti il pivot centrale), i tutori costituiscono la base per un recupero funzionale completo attraverso la tutela delle strutture legamentose in fase di guarigione e il mantenimento della mobilità articolare del ginocchio, elemento chiave per prevenire le complicanze associate all'immobilizzazione. Le aste articolate policentriche permettono di limitare la flessione-estensione, accompagnando e proteggendo l'articolazione durante il movimento.

GENUFIT 29 · 29A (corta)

GENUFIT 30 · 30A (lunga)

Ginocchiera in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E (tubulare) · (apribile)

FUNZIONALITÀ

Nell'ambito del trattamento conservativo per traumi distorsivi fino al II° grado (non coinvolgenti il pivot centrale), i tutori costituiscono la base per un recupero funzionale completo attraverso la tutela delle strutture legamentose in fase di guarigione e il mantenimento della mobilità articolare del ginocchio, elemento chiave per prevenire le complicanze associate all'immobilizzazione.

Le aste articolate policentriche permettono di limitare la flessione-estensione, accompagnando e proteggendo l'articolazione durante il movimento.

INDICAZIONI

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

CARATTERISTICHE

- Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni: flessione, estensione o blocco: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°
- Solo Genufit 29/30: foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Solo Genufit 29A/30A: nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Disponibile in due lunghezze: 34 cm (Genufit 29/29A) e 41 cm (Genufit 30/30A)
- Solo Genufit 30/30A: Inserto elastico posteriore, nella parte prossimale di coscia



Snodo facilmente regolabile tramite perni senza bisogno di attrezzi



genuFIT
29



genuFIT
29A



genuFIT
30



genuFIT
30A

genuFIT 60

Ginocchiera tubolare corta
in tessuto AirX™



genuFIT
60

FUNZIONALITÀ

Tutore tubolare corto con funzione contenitiva e propriocettiva, per facilitare il controllo e la regolazione fine dei movimenti e ridurre la dolorabilità.

INDICAZIONI

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado
- Tendiniti



genuFIT
16

genuFIT 16

Ginocchiera in tessuto AirX™
per stabilizzazione rotulea

genuFIT 63

Ginocchiera tubolare corta
in tessuto AirX™ con foro rotuleo



genuFIT
63

FUNZIONALITÀ

Tutore tubolare corto con funzione contenitiva e propriocettiva, per facilitare il controllo e la regolazione fine dei movimenti e ridurre la dolorabilità. L'apertura serve a stabilizzare la rotula nei casi di instabilità molto lieve.

CARATTERISTICHE

- Foro rotuleo rinforzato

INDICAZIONI

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

FUNZIONALITÀ

Tutore ampiamente collaudato per la stabilizzazione rotulea. Il tutore, grazie allo stabilizzatore laterale e ai tiranti di spinta, è in grado di svolgere un'azione contenitiva laterale. Genufit16 continua a essere disponibile nella versione abituale.

genuFIT 04

Ginocchiera tubolare in tessuto AirX™
con stabilizzatore rotuleo



genuFIT
04

FUNZIONALITÀ

Tutore tubolare con funzione contenitiva e propriocettiva, per facilitare il controllo e la regolazione fine dei movimenti e ridurre la dolorabilità. L'apertura rotulea e il relativo stabilizzatore in materiale espanso sono utili in caso di lievi instabilità rotulee.

CARATTERISTICHE

- Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Sottili stecche laterali antimigrazione

INDICAZIONI

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

CARATTERISTICHE

- Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a J in materiale espanso
- Stecche a spirale laterali e mediali
- Tiranti con verricello (accordabili a misura)

INDICAZIONI

- Instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

Linea Genufit:

Una soluzione per tutte le esigenze

Prospetto di fornitura



genufit 04



genufit 16

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34

Ambidestro



genufit 60



genufit 63

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	27	27	27	27	27	27

Ambidestro



genufit 08



genufit 08A



genufit 15



genufit 15A

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34

Ambidestro



genufit 25



genufit 25A



genufit 29



genufit 29A

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34

Ambidestro



genufit 27



genufit 27A



genufit 30



genufit 30A

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	41	41	41	41	41	41

Ambidestro



genUFIT

La nuova linea **Genufit** rappresenta la scelta ideale per i vostri pazienti. I diversi modelli di ginocchiere, ortesi e tutori disponibili offrono il massimo del comfort, presentano un taglio moderno e assicurano un decorso corretto della terapia.



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

Tel. 0049 (0)7221 9913911 · Fax 0049 (0)7221 9913913

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:


Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

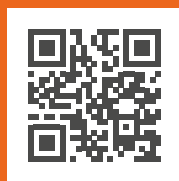

www.orthoservice.com

