



go up pcl

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato, versione PCL

Codice: REF. G1044

Taglia	Universale
Lungh. aste cm	56

INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa PCL)
- Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio

CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0)7221 9719780 · Fax 0049 (0)7221 9719782
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take
care
feel
better

go up pcl

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato, versione PCL

REF. G1044




ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take
care
feel
better

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato, versione PCL

IL TRATTAMENTO DEL LEGAMENTO CROCIATO POSTERIORE

L'utilizzo della ginocchiera **GoUp PCL** ha la sua indicazione principe nel post-operatorio della chirurgia di ricostruzione legamentosa specifica del legamento crociato posteriore (PCL). Scopo del tutore articolato è quello di proteggere l'articolazione del ginocchio da sollecitazioni meccaniche sia in flesso-estensione che in varo-valgo, permettendo tuttavia un graduale e controllato recupero del range of motion (ROM). **Il cuscinetto retro-tibiale gonfiabile consente di alleggerire selettivamente il legamento crociato posteriore dal carico cui è sottoposto**, permettendo una guarigione progressiva della lesione e l'adattamento del tessuto impiantato alla nuova funzione cui è chiamato. Il tipo di lesione, l'esperienza del chirurgo ed i protocolli adottati determinano le tempistiche di immobilizzazione e di recupero del ROM controllato dalla ginocchiera.

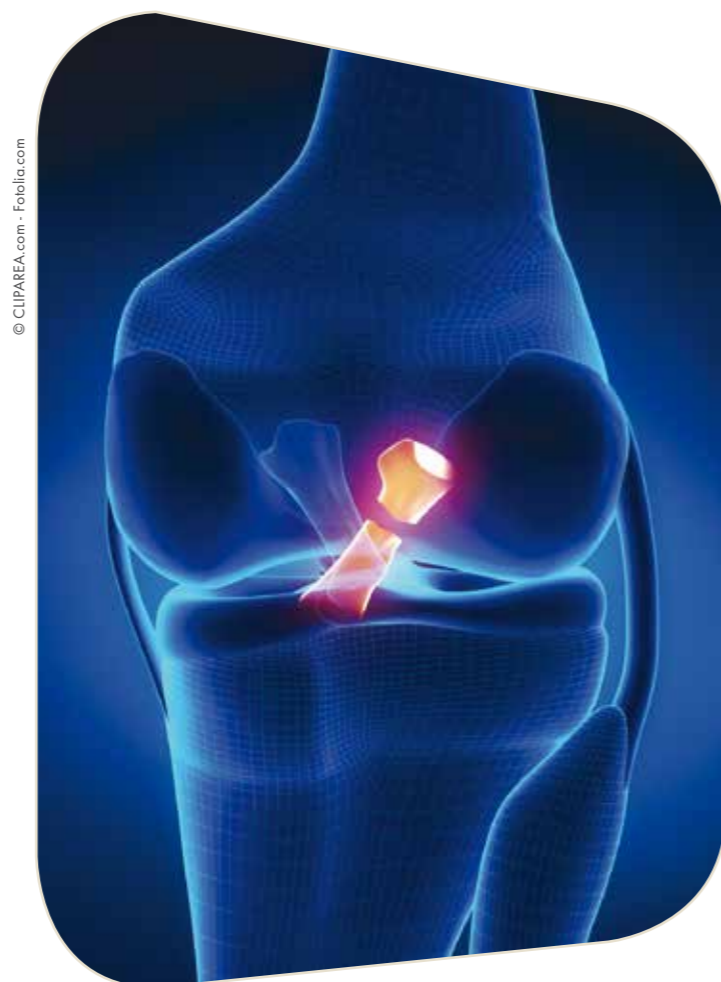

Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste. Foderate solo esternamente, sono tagliabili, per un perfetto adattamento alla circonferenza della gamba

Snodo di regolazione non-metallico, leggero e impostabile intuitivamente

- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell'articolazione da 0° a +60° con passo 10°
- Sistema autoagganciante strutturale (velcro non incollato)

CUSCINETTO RETRO-TIBIALE GONFIABILE PER SCARICARE SELETTIVAMENTE IL PCL

Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili e lavabili

Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio

Cinturini anteriore e posteriore distinti, per garantire un preciso posizionamento delle aste lungo la linea mediana della gamba

