

...Und die physiologische Ausrichtung  
des gesamten Gelenks fördert

Der eigentliche Vorteil einer Orthese, die an **3 Druckpunkten** ansetzt, liegt in ihrer Tiefenwirkung: der **Druck auf das Knie**, kombiniert mit der **Wirkung der 4 Gurte** und des kontralateralen Hebelsystems, bewirkt, dass das Gelenk eine Position einnimmt, die seiner physiologischen Position näher kommt. Dies dient folgenden Effekten:

- **sofortiges Lindern lokaler Schmerzen und Entlasten der Gelenksehnen**
- **natürlichere Körperhaltung**
- **ausgeglicheneres Gehen**
- **Begünstigung des gesamten Bewegungsapparates.**

Die vergleichenden Röntgen-Daten, mit und ohne angelegter Orthese, zeigen eine Varuskorrelation von maximal 2 Grad, die zwar numerisch als gering anzusehen ist, aber dennoch für alle Fälle der Inoperabilität oder eines nicht operationsbereiten Patienten (Operationsverweigerung) signifikant ist.

In Anbetracht des klinischen Falles einer signifikanten Gonarthrose und damit, zumindest röntgenografisch, bereits von chirurgischer Relevanz, ist die Korrektur von 2 Grad als wirksam zu betrachten, um die direkt bemerkbare Zufriedenheit des Patienten durch die Linderung des wichtigsten Symptoms zu erreichen: den Schmerz.

## genuFEEL OA

Knieorthese zur Entlastung und Führung

M.24014 R

M.24014 L

HMV: 23.04.04.1034

### Indikationen

- Mediale oder laterale Gonarthrose
- Postoperative Unterstützung für Knorpel und Meniskus

| Artikelnummer                      | M.24014 R + M.24014 L |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Größe                              | XS                    | S     | M     | L     | XL    | XXL   | 3XL   |
| Umfang 15 cm über der Kniemitte cm | 33/39                 | 39/45 | 45/52 | 52/58 | 58/66 | 67/74 | 74/81 |
| Höhe cm                            | 40                    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Farbe                              | Dunkelgrau            |       |       |       |       |       |       |

Rechts oder links angeben

**RECHTS** = bei medialer Gonarthrose des rechten Knies (Varusstellung rechtes Knie) oder bei lateraler Gonarthrose des linken Knies (Valgusstellung linkes Knie)

**LINKS** = bei medialer Gonarthrose des linken Knies (Varusstellung linkes Knie) oder bei lateraler Gonarthrose des rechten Knies (Valgusstellung rechtes Knie)



www.orthoservice.com



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better

## Knieorthese bei Gonarthrose - die geschmeidige Entlastung

HMV: 23.04.04.1034


## Die Zeit , als Schlüsselfaktor

Schmerzen lindern und die Lebensqualität der Patienten verbessern:

- **bei inoperabler Gonarthrose**
- **während des Wartens auf den Eingriff**
- **in einem Alter, das für eine chirurgische Behandlung noch nicht geeignet ist,**

das ist das eigentliche Ziel. **GenuFeel OA** lindert die Nebenwirkungen einer Gonarthrose.

Das Klettband **schließen**, die Gurte **einhängen**, Spannhebel **drücken**: eine Abfolge drei einfacher Handgriffe, die durch die innovative Konstruktion, die selektierten Materialien und sehr funktionale Details ermöglicht werden.

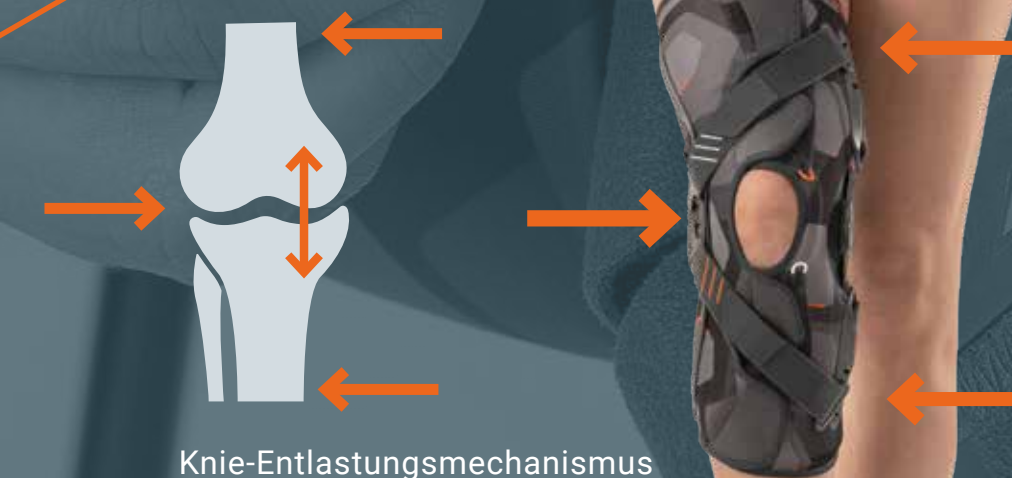

Knie-Entlastungsmechanismus

Das einzige patentierte System, das in  
weniger als 1 Minute angelegt ist...



## ABSOLUTER KOMFORT

auf der Haut dank des **dehnbaren und atmungsaktiven Materials**, das aus einem Stück gewebt wurde mit eingearbeiteter Polsterung in den Druckbereichen.



## EFFIZIENTE VERTEILUNG DES DRUCKS

dank des innovativen Rings, der mit einer Schutzpolsterung (aus **Gel**, abnehmbar) auf der Innenseite versehen ist



## REGULIERUNG DER FLEXION/EXTENSION

mit einem einfach handhabbaren Gelenk



## EINFACHES SPANNEN DER GURTE

dank der flachen Hebel, die durch leichten Druck bedient werden können.



## SCHNELLES UND PRAKTISCHES ANLEGEN

dank der **Öffnung** der Orthese auf der Vorderseite. Die Griffaschen für die Finger, erleichtern das Schließen des Klettbandes.



## VORPOSITIONIERUNG DER GURTE

in den farblich gekennzeichneten Schleifen möglich. Kann vor dem Einhängen am Ring als Haltevorrichtung dienen.

## EINPRÄGSAME BESTIMMUNG DER GURTSPANNUNG

für eventuelle Anpassungen durch eine **gestrichelte Skala**.



Die anschmiegsame und bedarfsgerechte Knieorthese bei Gonarthrose

## TADELLOSER SITZ AM BEIN

dank der anatomischen Form, der stabilisierenden **Schienen** (innen gepolstert) – auf der einen **Seite** aus Stahl und auf der anderen **Seite** aus dem flexiblen Polymer.

